

Vigtige henvisninger ifm. pleje af pudebetrækket:

Rengøring:

Ved rengøring forstås, at synligt snavs og usynligt organisk materiale fjernes, dette gøres for at forhindre, at mikroorganismer kan formere sig i dette.

Rengør med varmt, mildt sæbelud og en mikrofiberklud eller en blød håndbørste. Det anbefales at rengøre pudeoverfladerne med regelmæssige mellemrum.

Brug ikke opløsningsmidler, klorid, polermidler, kem. rengøringsmidler eller vokspolermidler!

Et specielle rengøringsmiddel kan bestilles hos os.

Vores anbefaling:



Rengøringsset til Skai produkter

til skånsom rengøring og pleje af pude overfladen (050-1000)

Bestående af:

- Sprøjteflaske med 200 ml specielt Skai rens
- 1 mikrofiberklud 40 x 40 cm

Desinfektion:

Ved desinfektion forstås, at sygdomsfremkaldende stoffer dræbes eller inaktiveres for at undgå, at mennesker bliver inficeret.

Brug heller ikke her opløsningsmiddelholdige produkter!

Uforholdsmæssig brug af desinfektionsmidler påvirker pudebetræksmaterialets levetid.

Efterfølgende desinfektionsmidler (se bagside) er testet for forenelighed og kan

bruges i den angivende dosering (her tages der forbehold for evt. ændringer, der måtte blive gennemført i desinfektionsmidlets sammensætning):

Pas på:

Sørg ubetinget for korrekt håndtering.

Overholdes dette ikke, kan pudebetrækket i løbet af kort tid blive sprødt, misfarvet eller få revner! I dette tilfælde bortfalder garantien.

Desuden er farvning fra jeans eller andre tekstiler udelukket fra garantien!

Desinfektionsmidler til Pandoria Plus

Betegnelsen	RKI-Listung	VAH-Listung	Producent
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Cleansept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid flade N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Franco-Cid N		x	Franken Chemie GmbH & Co.KG
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH

Alle angivene desinfektionsmidler virker mod SARS-CoV-2 iht. producentens oplysninger

Bemærk:

Når du bruger et desinfektionsmiddel, skal du altid tage hensyn til doseringsinstruktionerne fra den respektive producent!