

„Staynu“

den ultimative innovation til pudebetræk:

Snavsresistent, rengøringsvenlig, hygiejnisk - en stor lettelse

Med den ny overfladefinishing, der baserer på „staynu“-teknologien, gøres den regelmæssige pleje af meget brugte overfaldet til en leg. En speciel belægning forsegler overfladen, så snavspartikler af enhver art næsten ikke kan sætte sig fast eller trænge dybt ind i belægningen.

Med rengøringsmidler er det bl.a. muligt at fjerne denne type snavs, der ikke mere kan fjernes på et almindeligt pudebetræk f.eks.:

- permanent-skrivestifter, kuglepenne, tusser, gel-stifter
- blod, urin, kropsfedt
- jod, betaisodona
- kosmetik som f.eks. læbestift, make-up
- Affarvninger fra jeans og endda skosvæerte

Rengøring

Det anbefales at fjerne let snavs med mildt sæbelud eller **skai®** rens og en mikrofiberklud. Kom produktet på det snavsede sted, lad det trække et stykke tid og tør det så af.

Fastsiddende pletter eller snavs fjernes bedst med f.eks. isopropanol (70% alkoholindhold). Her kan der også bruges en blød håndbørste. Det er altid muligt at behandle overfladen med denne højtkoncentrerede alkohol.

Overfladen bliver ikke beskadiget.

Tør efter med rent vand eller med sæbelud.

Der kræves intet specielt plejemiddel.

Skure- eller blegemiddel bør ubetinget undgås.

Som altid gælder: Test altid først et skjult sted.

Vores anbefaling:



Rengøringssæt til Skai produkter

til skånsom rengøring og pleje af pude overfladen
(050-1000)

Bestående af:

- Sprøjteflaske med 200 ml specielt Skai rens
- 1 mikrofiberklud 40 x 40 cm

Desinfektion

Iht. loven om medicinsk udstyr er vi forpligtet til at nævne et udvalg af desinfektionsmidler, der må bruges uden problemer.

Der er testet mange forskellige almindelige desinfektionsmidler, alle disse kan uden undtagelse bruges.

Skulle dit desinfektionsmiddel ikke være nævnt her, må du gerne kontakte os.

Desinfektionsmiddel til „staynu“ Toronto EN

Betegnelsen	RKI-Listung	VAH-Listung	Producent
Cleanisept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche NR		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisal Plus		x	Dr. Schumacher GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Microbac Tissues		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 sensitive		x	Bode Chemie
Bacillol AF	x	x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozyd sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozyd universal liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozyd universal wipes		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe S		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe NG		x	Ecolab GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol Wipes sensitive			B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
Hexaquart pure 1%			B.Braun Melsungen
FD 300		x	Dürr Dental AG
FD 366		x	Dürr Dental AG
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Aquama Indigo			Aquagenius Schweiz GmbH
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Alchesan Fläche 80R		x	Alcheverde GmbH

Alle angivende desinfektionsmidler virker mod SARS-CoV-2 iht. producentens oplysninger

Denne liste er et gennemsnit af de almindelige desinfektionsmidler. Alle indtil dato testede midler kan bruges uden betænkning. Når du bruger et desinfektionsmiddel, skal du altid tage hensyn til doseringsinstruktionerne fra den respektive producent! Desinfektionsmidlernes sammensætning svarer til status på tidspunktet for den udførte test. Der kan ikke gives nogen garanti for eventuelle ændringer i formuleringen af desinfektionsmidlerne fra producenterne.

K. H. DEWERT GmbH - Vollmestr. 7 - 33649 Bielefeld – Germany
 Tlf. 0521/40027-0 | Fax 0521/40027-27 | info@kh Dewert.de