

Wichtige Hinweise zur Reinigung des Polsterbezuges:

Der Polsterbezug Ihres Produktes ist elektrisch leitfähig ausgeführt.

Reinigung:

Unter Reinigung wird die Beseitigung von sichtbarem Schmutz und unsichtbarem organischem Material verstanden, um zu verhindern, dass sich Mikroorganismen darin vermehren können.

Benutzen Sie zur Reinigung eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofaser Tuch oder eine weiche Handbürste. Wir empfehlen, regelmäßig eine Reinigung der Oberfläche Ihrer Polsterauflagen vorzunehmen.

Entfernen Sie Flecken sofort und lassen Sie diese nicht einziehen. Nach dem Reinigen den Polsterbezug mit warmem Wasser nachwischen.

Bitte setzen Sie keine fett- oder ölhaltigen Lederpflegemittel ein, ebenso wenig lösungsmittelhaltige Reiniger oder grobe, scheuernde Bürsten.

Desinfektion:

Unter Desinfektion wird das Abtöten bzw. Inaktivieren von Krankheitserregern zur Vermeidung von Infektionen bei Menschen verstanden.

Verwenden Sie auch hierfür keine lösungsmittelhaltigen Erzeugnisse!

Unverhältnismäßiger Einsatz von Desinfektionsmitteln beeinflusst die Lebensdauer des Polsterbezugsmaterials.

Nachfolgende Desinfektionsmittel (siehe Rückseite) sind auf Verträglichkeit getestet und können entsprechend der Dosierungsanleitung des jeweiligen Herstellers eingesetzt werden (vorbehaltlich etwaiger Änderungen in der Zusammensetzung der Desinfektionsmittel).

Achtung:

Hierbei unbedingt auf sachgerechte Handhabung achten.

Nichtbeachtung kann innerhalb kurzer Zeit zur Versprödung, Verfärbung und Rissbildung des Polsterbezugs führen! In diesem Fall ist eine Gewährleistung ausgeschlossen.

Ebenso sind Anfärbungen durch Jeans oder anderen Textilien von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Desinfektionsmittel für Mano-S

| Bezeichnung | Max. Konzentration | RKI-Listung | VAH-Listung | Hersteller |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Cleanisept Wipes | | | x | Dr. Schumacher GmbH |
| Descosept Sensitive Wipes | | | x | Dr. Schumacher GmbH |
| Descosept Spezial Wipes | | | x | Dr. Schumacher GmbH |
| Microbac forte | 3% | | x | Bode Chemie |
| Bacillol 30 sensitive foam | | | | Bode Chemie |
| Incidin Plus | 5% | x | x | Ecolab GmbH |
| Meliseptol foam pure | | | x | B.Braun Melsungen |
| Meliseptol rapid | | | x | B.Braun Melsungen |
| FD 300 | 1% | | x | Dürr Dental AG |
| FD 366 | unverdünnt | | x | Dürr Dental AG |
| Descogen Liquid r.f.u. | | | x | Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH |
| Lysoformin spezial | 0,75% | x | x | Lysoform, Dr. Rosemann GmbH |
| Aldasan 2000 | 4% | x | x | Lysoform, Dr. Rosemann GmbH |
| Apesin rapid | 3% | | x | Tana Chemie GmbH |
| CosiMed | 7,5% | | | CosiMed GmbH |

Vor der Benutzung anderer Desinfektionsmittel bitte den Hersteller dieser Mittel nach der Eignung seines Produktes befragen. Er kann die chemische Zusammensetzung und Wirkung am besten beurteilen. Für Tests liefern wir Ihnen gerne kostenlose Musterstücke des Polsterbezugs.

K. H. DEWERT GmbH - Vollmestr. 7 - 33649 Bielefeld – Germany
Tel. 0521/40027-0 | Fax 0521/40027-27 | info@khdewert.de

Anmerkung: Die Zusammensetzung der Desinfektionsmittel entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der durchgeführten Prüfung. Für etwaige Änderungen an der Formulierung der Desinfektionsmittel durch die Hersteller kann keine Gewähr übernommen werden.