

„Staynu“ die ultimative Innovation beim Polsterbezug:

Schmutzresistenz, Reinigungsfreundlichkeit, Hygiene leicht gemacht

Dank des neuartigen Oberflächen-Finishing durch die „staynu“-Technologie ist die regelmäßige Pflege stark frequentierter Oberflächen so einfach wie nie. Eine spezielle Beschichtung versiegelt die Oberfläche, sodass Schmutzpartikel, egal welcher Art, kaum anhaften und nicht tief in die Beschichtung eindringen können. Mit Reinigungsmitteln lassen sich unter anderem diese Verschmutzungen entfernen, die bei einem herkömmlichen Polsterbezug nicht mehr entfernt werden können, z.B.:

- Permanent-Schreibstifte, Kugelschreiber, Marker, Gel-Stifte
- Blut, Urin, Körperfette
- Jod, Betaisodona
- Kosmetika wie Lippenstift, Make-up
- Abfärbungen von Jeans und sogar Schuhcreme

Reinigung

Wir empfehlen für leichte Verunreinigungen eine Reinigung mit milder Seifenlauge oder **skai®** Reiniger und einem Mikrofaser Tuch. Einfach auf die verunreinigte Stelle geben, etwas einwirken lassen und abwischen. Hartnäckige Flecken oder Verschmutzungen lassen sich zum Beispiel mit Isopropanol (70% Alkoholgehalt) bestens entfernen. Hier kann auch eine weiche Handbürste zur Hilfe genommen werden. Eine Behandlung der Oberfläche mit diesem hochkonzentrierten Alkohol ist jederzeit möglich. Die Oberfläche wird nicht beschädigt. Anschließend mit klarem Wasser oder mit Seifenlauge nachwischen. Ein Spezialpflegemittel ist nicht erforderlich. Scheuer- oder Bleichmittel sollten unbedingt vermieden werden. Wie immer gilt: Bitte zunächst an verdeckter Stelle testen.

Unsere Empfehlung:

Reinigungsset für Skai-Produkte

zur schonenden Reinigung und Pflege der Polsteroberfläche
(Art.-Nr. 050-1000)

Bestehend aus:

- Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel
- 1 Mikrofaser-Pflegetuch 40 x 40 cm

Wir empfehlen für das Material Tovega EN den Einsatz einer weichen Handbürste, um auch die tiefe Struktur der Mikroporen zu erreichen.

Desinfektion

Nach Medizinproduktegesetz sind wir verpflichtet, eine Auswahl an Desinfektionsmitteln, die problemlos eingesetzt werden dürfen, aufzuführen.

Es wurde eine Vielzahl an gängigen Desinfektionsmitteln getestet, davon sind alle ohne Ausnahme einsetzbar.

Sofern Ihr Desinfektionsmittel hier nicht aufgeführt ist, können Sie uns gern kontaktieren.



Die folgende Liste ist ein Querschnitt gängiger Desinfektionsmittel. Sämtliche bisher getesteten Mittel können bedenkenlos, entsprechend der Dosierungsanleitung des jeweiligen Herstellers, eingesetzt werden.

Anmerkung: Die Zusammensetzung der Desinfektionsmittel entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der durchgeführten Prüfung. Für etwaige Änderungen an der Formulierung der Desinfektionsmittel durch die Hersteller kann keine Gewähr übernommen werden.

Desinfektionsmittel für „staynu“ Toronto EN & Tovega EN

Bezeichnung	Hersteller	RKI-Listung	VAH-Listung	Wirkstoffklasse	
				1	2
Cleanisept/Wipes	Dr. Schumacher GmbH		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	
Optisept	Dr. Schumacher GmbH	x	x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Aldehyd
Biguanid Fläche NR	Dr. Schumacher GmbH		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	
Descosept PUR Wipes RTU	Dr. Schumacher GmbH		x	Alkohol	
Descosept Sensitive Wipes	Dr. Schumacher GmbH		x	Alkohol	
Descosept spezial Wipes	Dr. Schumacher GmbH		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	
Ultrasol active	Dr. Schumacher GmbH		x	Peroxidverbindungen	
Optisal Plus	Dr. Schumacher GmbH		x		
Microbac forte	Bode Chemie		x	Alkylamine/Alkylamide	
Microbac Tissues	Bode Chemie		x		
Kohrsolin FF	Bode Chemie		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Aldehyd
Bacillol 30 sensitive	Bode Chemie		x	Alkohol	Alkylamine/ Alkylamide
Bacillol AF	Bode Chemie	x	x		
Dismozon plus	Bode Chemie	x	x	Peroxidverbindungen	
Perform	Schülke & Mayr	x	x	Peroxidverbindungen	
Mikrozid sensitive liquid	Schülke & Mayr		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Alkylamine/ Alkylamide
Mikrozid universal liquid	Schülke & Mayr		x	Alkohol	
Mikrozid universal wipes	Schülke & Mayr		x		
Terralin protect	Schülke & Mayr	x	x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Glykolderivate
Incidin liquid	Ecolab GmbH		x	Alkohol	
Incidin Pro	Ecolab GmbH		x	Alkohol	Alkylamine/ Alkylamide
Incidin Plus	Ecolab GmbH	x	x	Glucoprotamin	
Incidin Aktive	Ecolab GmbH	x	x	Peroxidverbindungen	organische Säuren
Incidin OxyWipe S	Ecolab GmbH		x	Peroxidverbindungen	
Incidin OxyWipe NG	Ecolab GmbH		x		
Meliseptol foam pure	B.Braun Melsungen		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Alkohol
Meliseptol Wipes sensitive	B.Braun Melsungen				
Meliseptol rapid	B.Braun Melsungen		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Alkohol
Hexaquart pure 1%	B.Braun Melsungen				
FD 300	Dürr Dental AG		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Alkylamine/ Alkylamide
FD 366	Dürr Dental AG		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Alkohol
Biguacid S	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Guanidin/ Guanidinderivate / Alkohol
Descogen Liquid r.f.u.	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH		x	Peroxidverbindungen	
Lysoformin spezial	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH	x	x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Guanidin/ Guanidinderivate
Aldasan 2000	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH	x	x	Alkohol	
Apesin rapid	Tana Chemie GmbH		x	Quartäre Ammoniumverbindungen	Alkylamine/ Alkylamide
Aquama Indigo	Aquagenius Schweiz GmbH			Peroxidverbindungen	
CosiMed Konzentrat	CosiMed GmbH			Quartäre Ammoniumverbindungen	Alkylamine/ Alkylamide
Alchesan Fläche 80R	Alcheverde GmbH		x		

Alle aufgeführten Desinfektionsmittel sind lt. Hersteller-Angaben wirksam gegen SARS-CoV-2