

Toronto "Staynu"

de ultieme innovatie voor bekledingsmateriaal

bestand tegen vuil, gemakkelijk te reinigen, hygiënisch

Dankzij de nieuwe afwerking van het oppervlak met de "staynu"-technologie is het onderhouden van vaak gebruikte oppervlakken nog nooit zo eenvoudig. Een speciale coating dicht het oppervlak af zodat geen enkele soort verontreinigde deeltjes aan het oppervlak kan kleven of diep in de coating kan indringen.

Met reinigingsmiddelen kunnen o.a. verontreinigingen worden verwijderd die bij gewoon bekledingsmateriaal niet meer kunnen worden verwijderd, bijv.:

- permanente marker, balpen, markeerstift, gelstiften
- bloed, urine, lichaamsvet
- jodium, Betaisodona
- cosmetica zoals lippenstift, make-up
- verkleuring door jeans of zelfs schoenpoets

Reiniging

Voor lichte verontreinigingen raden we aan om te reinigen met een milde zeepoplossing of **skai®**-reiniger en een microvezeldoek. Breng het reinigingsmiddel gewoon aan op de verontreinigde plaats, laat het inwerken en veeg het schoon.

Hardnekkige vlekken of verontreinigingen kunnen het best bijv. met isopropanol (70% alcoholgehalte) worden verwijderd. Hierbij kunt u ook een zachte handborstel gebruiken. Het oppervlak kunt u steeds met deze hooggeconcentreerde alcohol behandelen. Hierdoor zal het oppervlak niet beschadigd raken.

Veeg vervolgens het oppervlak met schoon water of een zeepoplossing schoon.

Een speciaal onderhoudsproduct is niet nodig.

Het gebruik van schuur- of bleekmiddelen moet absoluut worden vermeden.

Zoals altijd geldt het volgende: test het product eerst op een bedekte plaats.

Onze aanbeveling:



Reinigungsset voor Skai-producten

voor zachte reiniging en verzorging van het bekledingsmateriaal
(050-1000)

Inhoud:

- verstuiverfles met 200 ml Skai-reiniger
- 1 microvezeldoek 40 x 40 cm

Desinfectie

Volgens het Duitse Medizinproduktegesetz (MPG, wet medische hulpmiddelen) zijn we verplicht om een lijst met desinfectiemiddelen te geven die probleemloos kunnen worden gebruikt.

Er werden talrijke gewone desinfectiemiddelen getest waarbij ze allemaal zonder uitzondering kunnen worden gebruikt.

Als uw desinfectiemiddel niet in de lijst staat, kunt u contact met ons opnemen voor advies.

Deze lijst is een samenvatting van gangbare desinfectiemiddelen. Alle tot nu geteste middelen kunnen zonder problemen worden gebruikt. Houd bij het gebruik van een desinfectiemiddel altijd rekening met de doseringsinstructies van de betreffende fabrikant!

Desinfectiemiddel voor "staynu" Toronto EN

Benaming	Lijst Robert Koch Institut	Lijst Verbund für angewandte Hygiene	Producent
Cleanisept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche NR		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisal Plus		x	Dr. Schumacher GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Microbac Tissues		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 sensitive		x	Bode Chemie
Bacillol AF	x	x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal wipes		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe S		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe NG		x	Ecolab GmbH
Meliseptol foam pure			B.Braun Melsungen
Meliseptol Wipes sensitive			B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
Hexaquart pure 1%			B.Braun Melsungen
FD 300		x	Dürr Dental AG
FD 366		x	Dürr Dental AG
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Aquama Indigo			Aquagenius Schweiz GmbH
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Alchesan Fläche 80R		x	Alcheverde GmbH

Alle vermelde desinfectiemiddelen zijn volgens de informatie van de fabrikant werkzaam tegen SARS-CoV-2

La composizione dei disinfettanti deve essere quella esistente al momento della prova. Non possono essere fornite garanzie per eventuali modifiche della formulazione dei disinfettanti da parte dei fabbricanti.

K. H. DEWERT GmbH - Vollmestr. 7 - 33649 Bielefeld – Germany
 Tel. 0521/40027-0 | Fax 0521/40027-27 | info@khdewert.de