

« Staynu »

La toute dernière innovation pour le revêtement de la sellerie :

Résistante aux salissures, facile à nettoyer, hygiénique

Grâce à la technologie « staynu » et sa nouvelle finition de surface, l'entretien régulier des surfaces fortement fréquentées n'a jamais été aussi simple. Un revêtement spécial protège les surfaces, de sorte que les particules de saleté, quelles qu'elles soient, n'y adhèrent pas et ne puissent pas y pénétrer en profondeur.

Ce type de salissures, qui ne peut plus être retiré d'un revêtement traditionnel, peut être éliminé avec un nettoyant. Par exemple :

- Stylo indélébile, stylo bille, marqueur, stylo à encre gel
- Sang, urine, graisses corporelles
- Iode, Bétadine
- Cosmétiques, tels que rouge à lèvres, maquillage
- Colorations dues au jean et même au cirage

Nettoyage

Pour les légères salissures, nous recommandons le nettoyage avec de l'eau légèrement savonneuse ou le nettoyant **skai®** et un chiffon microfibras. Il suffit de traiter l'endroit souillé, de laisser agir et d'essuyer.

Les taches ou salissures tenaces s'éliminent parfaitement avec, par exemple, de l'alcool isopropylique (70 %).

Pour cela, il est aussi possible d'utiliser une brosse douce. Le traitement de la surface avec cet alcool fortement concentré est possible à tout moment. La surface ne sera pas endommagée.

Rincer ensuite à l'eau claire ou savonneuse.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit d'entretien spécial.

Éviter impérativement les produits abrasifs ou les agents de blanchiment.

Conseil : tester d'abord sur un endroit non apparent.

Notre recommandation:



Kit de nettoyage pour produits de Skai

Pour nettoyage et entretien en douceur de la surface
(050-1000)

Constitué par:

- vaporisateur avec 200 ml nettoyant special Skai
- 1 chiffon microfibras 40 x 40 cm

Désinfection

Nous sommes contraints par la loi allemande sur les produits médicaux à dresser la liste des désinfectants pouvant être utilisés sans problèmes.

De nombreux désinfectants courants ont été testés ; ils peuvent tous être utilisés sans exception.

Si votre désinfectant ne figure pas dans la liste, veuillez nous contacter.

Désinfectant pour « staynu » Toronto EN

Nom	Classification RKI	Classification VAH	Fabricant
Cleanisept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche NR		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisal Plus		x	Dr. Schumacher GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Microbac Tissues		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 sensitive		x	Bode Chemie
Bacillol AF	x	x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal wipes		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe S		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe NG		x	Ecolab GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol Wipes sensitive			B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
Hexaquart pure 1%			B.Braun Melsungen
FD 300		x	Dürr Dental AG
FD 366		x	Dürr Dental AG
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Aquama Indigo			Aquagenius Schweiz GmbH
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Alchesan Fläche 80R		x	Alcheverde GmbH

Selon les indications des fabricants, tous les désinfectants mentionnés sont efficaces contre le SARS-CoV-2

Cette liste est un aperçu des désinfectants courants. Tous les produits testés jusqu'à présent peuvent être utilisés sans problèmes. Veuillez toujours tenir compte des instructions de dosage du fabricant respectif !

La composition des désinfectants est la même qu'au moment de l'essai. Aucune garantie ne peut être donnée pour les modifications éventuelles de la formulation des désinfectants par les fabricants.