

Toronto "Staynu"

La soluzione innovativa per i rivestimenti di imbottiture:

resistenza allo sporco, facilità di pulizia, igiene semplificata

Grazie all'innovativa finitura superficiale con tecnologia "staynu", la manutenzione regolare delle superfici molto sfruttate non è mai stata così facile. Un rivestimento speciale sigilla la superficie in modo tale che le particelle di sporco, di qualsiasi tipo, difficilmente aderiscono e non possono così penetrare in profondità nel rivestimento. Con l'impiego di prodotti per la pulizia è possibile inoltre rimuovere tutte quelle imbrattature che su un rivestimento convenzionale per imbottiture non potrebbero essere eliminate, ad esempio:

- macchie di pennarelli permanenti, penne a sfera, marker, penne gel
- sangue, urina, grassi corporei
- iodio, Betaisodona
- cosmetici come rossetto, trucco
- macchie causate da jeans e persino dal lucido da scarpe

Pulizia

Per lo sporco leggero si consiglia di effettuare una pulizia con liscivia di sapone delicata o con il detergente **skai®** e un panno in microfibra. È sufficiente effettuare un'applicazione sulla zona sporca, lasciare agire per un po' e pulire con un panno.

Le macchie o le contaminazioni più ostinate si rimuovono meglio con isopropanolo (70% di alcol), ad esempio. A questo scopo è possibile utilizzare anche una spazzola manuale a setole morbide. La superficie può essere trattata con questo alcool altamente concentrato in qualsiasi momento. La superficie non subisce danni.

Infine detergere con acqua chiara o acqua saponata.

Non è necessario utilizzare alcun prodotto di cura speciale.

Evitare a tutti i costi l'utilizzo di detergenti abrasivi o sbiancanti.

Come sempre, effettuare prima dei test in un punto nascosto.

Nostra raccomandazione:



Kit di pulizia per Skai-prodotti

per una pulizia delicata e la cura della superficie della imbottitura
(050-1000)

Contenuto:

- bottiglia atomizzatore con 200 ml detergente skai
- 1 panno in microfibra 40 x 40 cm

Disinfezione

In base alla legge sui dispositivi medici siamo obbligati a fornire una selezione di prodotti disinfettanti che possono essere utilizzati senza problemi.

È stata testata una varietà di prodotti disinfettanti comuni, tutti utilizzabili senza eccezione.

Se il vostro prodotto disinfettante non è presente nell'elenco, non esitate a contattarci.

Disinfettanti per "staynu" Toronto EN

Denominazione	Elenco RKI	Elenco VAH	Produttore
Cleanisept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche NR		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisal Plus		x	Dr. Schumacher GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Microbac Tissues		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 sensitive		x	Bode Chemie
Bacillol AF	x	x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal wipes		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe S		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe NG		x	Ecolab GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol Wipes sensitive			B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
Hexaquart pure 1%			B.Braun Melsungen
FD 300		x	Dürr Dental AG
FD 366		x	Dürr Dental AG
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Aquama Indigo			Aquagenius Schweiz GmbH
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Alchesan Fläche 80R		x	Alcheverde GmbH

Tutti i disinfettanti elencati sono efficaci contro la SARS-CoV-2 secondo le informazioni fornite dai produttori

Questo elenco fornisce una rassegna di disinfettanti comuni. Tutti i prodotti testati finora possono essere utilizzati senza problemi. Tenere sempre in considerazione le istruzioni di dosaggio del rispettivo produttore!
 La composizione dei disinfettanti deve essere quella esistente al momento della prova. Non possono essere fornite garanzie per eventuali modifiche della formulazione dei disinfettanti da parte dei fabbricanti.

K. H. DEWERT GmbH - Vollmestr. 7 - 33649 Bielefeld – Germany
 Tel. 0521/40027-0 | Fax 0521/40027-27 | info@khdewert.de