

Toronto “Staynu”

den ultimative innovasjonen innen polstertrekk

Smussresistent, lett å rengjøre, hygienisk

Takket være den nye typen overflate-finishen med “staynu”-teknologien har regelmessig pleie av sterkt frekventerte overflater aldri være enklere. Et spesielt belegg forseglar overflaten, slik at smusspartikler, uansett type, praktisk talt ikke kan feste seg og ikke kan trenge inn i belegget.

Med rengjøringsmidler kan man blant annet fjerne dette smusset som ikke kan fjernes fra et vanlig polstertrekk, f. eks.

- Permanent-stifter, kulepenn, marker, tusjpenner
- blod, urin, kroppsfett
- jod, betaisodona
- kosmetikk med leppestift, sminke
- avfarging fra jeans og til og med skokrem

Rengjøring

Vi anbefaler at du bruker mildt såpevann eller **skai®** -rengjøringsmidler eller en mikrofiberklut. Før det på det skitne stedet, la det virke litt og tørk det av.

Hårnakkede flekker eller smuss kan fjernes med isopropanol (70 % alkohol). Man kan også benytte en myk håndbørste. Det er til enhver tid mulig å behandle overflaten med denne høykonsentrerte alkoholen. Overflaten skades ikke.

Deretter tørker du av med rent vann eller en såpeblanding.

Det er ikke nødvendig å bruke et spesialpleiemiddel.

Skure- eller blekemidler får ikke benyttes.

Som alltid gjelder: Test først på et sted som ikke er synlig.

Vår anbefaling:



Rengjøringssett for Skai produktene

for skånsom rengjøring og stell av polstertrekk
(050-1000)

Innhold:

- forstøverflaske med 200 ml Skai-rengjøringsmidler
- 1 mikrofiberklut 40 x 40 cm

Desinfeksjon

I henhold til lovgivningen for medisinprodukter er vi forpliktet til å føre opp et utvalg av desinfeksjonsmidler som kan benyttes uten problemer.

Et stort antall vanlige desinfeksjonsmidler ble testet. Alle kan benyttes.

Hvis det desinfeksjonsmiddelet du bruker ikke er oppført her, kan du ta kontakt med oss.

Desinfeksjonsmiddel for “staynu” Toronto EN

Betegnelsen	RKI-oppføring	VAH-oppføring	Produsent
Cleanisept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche NR		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spesial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisal Plus		x	Dr. Schumacher GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Microbac Tissues		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 sensitive		x	Bode Chemie
Bacillol AF	x	x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozyd sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozyd universal liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozyd universal wipes		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe S		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe NG		x	Ecolab GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol Wipes sensitive			B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
Hexaquart pure 1%			B.Braun Melsungen
FD 300		x	Dürr Dental AG
FD 366		x	Dürr Dental AG
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Lysoformin spesial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Aquama Indigo			Aquagenius Schweiz GmbH
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Alchesan Fläche 80R		x	Alcheverde GmbH

Alle desinfeksjonsmidlene som er oppført er iht. produsentens informasjoner virksomme mot SARS-CoV-2

Denne listen er en oversikt over vanlige desinfeksjonsmidler. Alle midlene som er testet hittil kan benyttes uten betenkeligheter. Når du bruker et desinfeksjonsmiddel, må du alltid ta hensyn til doseringsinstruksjonene til den respektive produsenten!

Sammensetningen av desinfeksjonsmidlene tilsvarer statusen på tidspunktet for testen som ble utført. Det kan ikke gis noen garanti for endringer i formuleringen av desinfeksjonsmidlene fra produsentene.

K. H. DEWERT GmbH - Vollmestr. 7 – D-33649 Bielefeld – Tyskland
Telf. 00 49 521/40027-0 | Faks 00 49 521/40027-27 | info@khdewert.de