

Toronto „Staynu”

innowacja w dziedzinie pokryć tapicerskich:

Odporność na zabrudzenia, łatwość czyszczenia, łatwa higiena

Dzięki nowemu rodzajowi wykończenia w technologii „staynu” regularna konserwacja intensywnie użytkowanych powierzchni nigdy nie była łatwiejsza. Specjalna powłoka uszczelnia powierzchnię tak, że cząsteczki brudu, niezależnie od rodzaju, z trudem do niej przywierają i nie wnikają w głąb powłoki.

Za pomocą środków czyszczących można usunąć zabrudzenia, które nie schodzą z tradycyjnych pokryć tapicerowanych, np:

- markery permanentne, długopisy, flamastry, długopisy żelowe
- krew, uryna, tłuszcze organiczne
- jod, jodopowidon
- kosmetyki, takie jak pomadki, make-up
- plamy z materiałów dżinsowych i nawet pasta do butów

Czyszczenie

W przypadku lekkich zabrudzeń zalecamy czyszczenie łagodnym roztworem wody z mydłem lub środkiem czyszczącym **skai®** i ściereczką z mikrofibry. Wystarczy nanieść środek na zabrudzone miejsce, pozostawić na chwilę i wytrzeć.

Uporczywe plamy lub zabrudzenia najlepiej usuwać np. izopropanolem (70% zawartości alkoholu). Do tego celu można również użyć miękkiej szczotki. Powierzchnię można zawsze poddać działaniu tego wysoko skoncentrowanego alkoholu. Powierzchnia nie ulegnie uszkodzeniu.

Następnie należy przetrzeć ją czystą wodą lub wodą z mydłem.

Nie jest wymagany specjalny środek pielęgnacyjny.

Należy unikać środków szorujących lub wybielających.

Jak zawsze obowiązuje zasada: należy najpierw wykonać test na ukrytej powierzchni.

Nasza rekomendacja:



Zestaw do czyszczenia produktów Skai

do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji powierzchni
(050-1000)

Zawartość:

- Butelka z rozpylaczem z 200 ml Specjalny środek czyszczący Skai
- 1 ściereczka z mikrofibry 40 x 40 cm

Dezynfekcja

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, jesteśmy zobowiązani do wymienienia wybranych środków dezynfekcyjnych, które mogą być bezproblemowo stosowane.

Przetestowaliśmy wiele popularnych środków dezynfekcyjnych – można stosować je wszystkie bez wyjątku.

Jeśli Państwa środek dezynfekcyjny nie jest tutaj wymieniony, prosimy o kontakt.

Środek dezynfekcyjny do „staynu” Toronto EN

Nazwa	Lista RKI	Lista VAH	Producent
Cleanisept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche NR		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisal Plus		x	Dr. Schumacher GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Microbac Tissues		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 sensitive		x	Bode Chemie
Bacillol AF	x	x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal wipes		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe S		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipe NG		x	Ecolab GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol Wipes sensitive			B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
Hexaquart pure 1%			B.Braun Melsungen
FD 300		x	Dürr Dental AG
FD 366		x	Dürr Dental AG
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Aquama Indigo			Aquagenius Schweiz GmbH
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Alchesan Fläche 80R		x	Alcheverde GmbH

Zgodnie z informacjami producenta wszystkie wymienione środki dezynfekcyjne są skuteczne przeciwko SARS-CoV-2

Ta lista zawiera przegląd powszechnych środków dezynfekcyjnych. Wszystkie przetestowane do tej pory środki można stosować bez żadnych obaw. Podczas stosowania środka dezynfekującego należy zawsze przestrzegać instrukcji dozowania danego producenta!

Skład środków dezynfekujących jest zgodny ze stanem w czasie przeprowadzania badania. Nie można zagwarantować, że producenci dokonają jakichkolwiek zmian w składzie środków dezynfekujących.